



PRELEVEMENT DE CRYOGLOBULINE

Guide de Bonne Pratique destiné aux IDE des unités de soins

Pour effectuer une recherche de **cryoglobuline**, le sang doit être maintenu à **37°C** (risque de faux négatif si exposé à température ambiante) :

Demander la boîte pour Cryoglobulines au laboratoire :

Quimper	: 24403 (ou 25354 sur le Plateau technique)
Pont L'Abbé	: 4340
Concarneau	: 4376
Douarnenez	: 1524



- Patient **à jeun** (4h minimum)
- Utiliser **impérativement** le matériel présent dans la boîte
- Prélever **3 tubes** rouges 7 MI
- Placer les tubes remplis dans les blocs chauds
- Remplir la feuille de suivi

- **Descendre immédiatement** au laboratoire



FEUILLE DE SUIVI DE LA CRYOGLOBULINE

A remplir par le service

Identité du Patient

Joindre la prescription

Nom du préleveur :

Heure de prélèvement :

Patient à jeun (4h) **Oui** **Non**

A remplir par le laboratoire

a) Coagulation à l'étuve 37°C (2 à 24h)

Heure de dépôt :

Heure de retrait :

Nom du TDL / IDE :

b) Centrifugation et décantation

N° Molis :

Nom du TDL :

c) Biologiste

