




## PRELEVEMENT CAPILLAIRE ET ENVOI PAR LE TRANSITIQUE

### 1) Remplissage du capillaire

- Introduire l'agitateur dans le capillaire et poser un bouchon à une extrémité, sans l'enfoncer.
- Laisser les forces capillaires remplir le tube capillaire en inclinant le tube vers le bas.

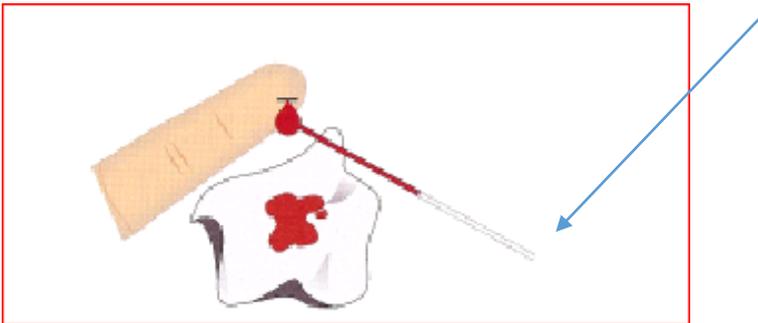


- S'il y a présence d'une bulle d'air, recommencer le prélèvement avec un autre capillaire.

*Il faut éviter de comprimer ou de masser le site de ponction pour ne pas risquer l'hémolyse ou la contamination de l'échantillon.*

- Sceller le capillaire avec le second bouchon.

### 2) Homogénéisation de l'échantillon

- Tenir le tube scellé entre 2 doigts et déplacer l'aimant sur toute la longueur du tube 10 fois dans chaque sens

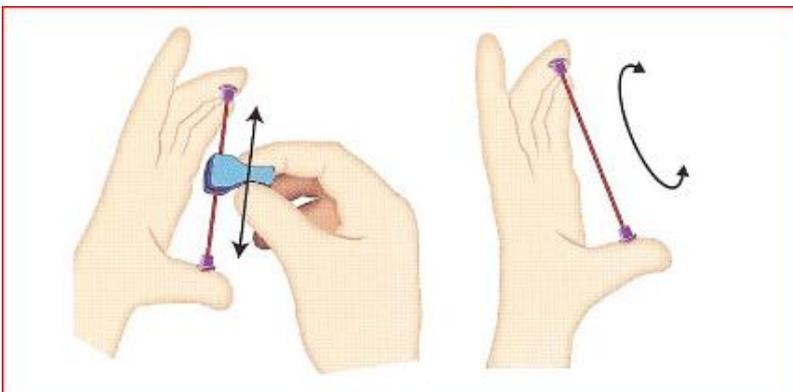



### 3) Identification du patient

Coller l'étiquette code à barre du patient perpendiculaire au tube



### 4) Envoi par le transitique

- Transmettre immédiatement l'échantillon au laboratoire
- Placer le capillaire dans un tube conique à crachat (caler avec un essuie-tout)



- Ne pas mettre dans un tube de 7 mL (si non capillaire coincé dans le tube de prélèvement !)

